



Panneaux latéraux

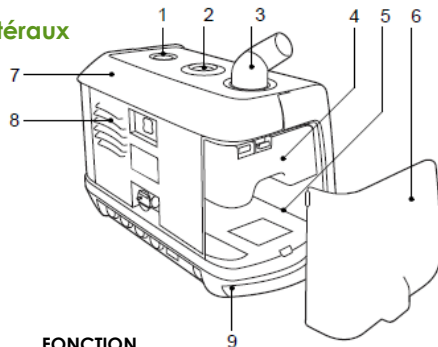

N°	FONCTION	FONCTION
1	Sil. Alar.	Mettre l'alarme sonore en pause
2	Marche/Arrêt	Démarrer et arrêter le traitement par ventilation
3	Sortie d'air vers le patient	Connexion pour le circuit patient
4	Unité de dérivation d'air	Module dérivation d'air silencieux pour une utilisation sans l'humidificateur clickin. (Si l'humidificateur click-in est utilisé, il remplace l'unité de dérivation d'air)
5	Compartiment click-in	Compartiment pour l'un ou l'autre des accessoires de l'humidificateur click-in ou de la batterie click-in.
6	Panneau latéral	Couvercle
7	Poignée de Transport	Poignée pour soulever le Vivo 45
8	Sortie d'air	Sortie d'air de refroidissement
9	Entrée d'air	Entrée d'air de refroidissement

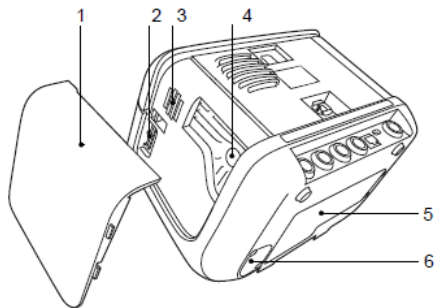


N°	FONCTION	FONCTION
1	Panneau latéral	Couvercle
2	Fente pour carte mémoire (carte SD)	Téléchargement mémoire
3	Alarme	Sortie des sons d'alarme
4	Entrée d'air du patient	Logement filtres remplaçables
5	Batterie interne	Compartiment pour la batterie interne
6	Trappe du capteur FiO2	Compartiment pour le capteur FiO2 optionnel


Verrouillage/Déverrouillage Mode domicile/clinique

En mode Domicile, le panneau est verrouillé pour empêcher de repasser en mode Clinique et donc prévenir toute modification accidentelle des réglages.


1 Appuyez et maintenez simultanément les flèches gauche et droite.

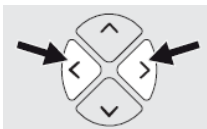

2 Relâchez les boutons quand la barre de progression est remplie.

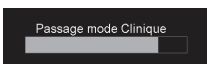


Panneau avant

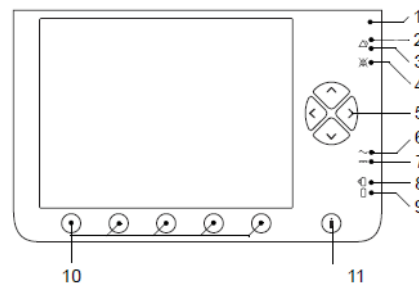

N°	LED	FONCTION
1	Capteur	Capteur de lumière ambiante
2-3	Alarme	Indication d'alarme (rouge et jaune)
4	Sil. Alar.	Indication d'alarme sonore mise en pause
6	Secteur	Alimentation : Secteur
7	Alim. DC ext.	Alimentation : DC externe
8	Batterie click-in	Alimentation : Batterie click-in
9	Batterie interne	Alimentation : Batterie interne
N°	BOUTONS UTILISATEUR	FONCTION
5	Navigation/Réglage	Navigation dans le menu en cours de sélection, définition des réglages
10	Fonction/Navigation	Fonction variant selon l'affichage
11	Information	Montrer/Cacher information

Panneau arrière

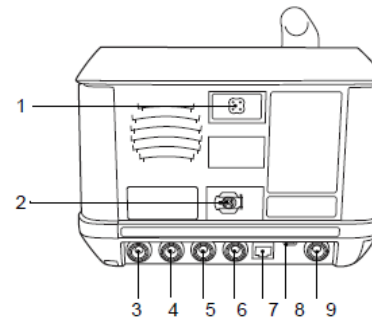

N°	ÉLÉMENT/SYMBOLE	FONCTION	COULEUR
1		Raccord pour fil chauffant	
2		Connexion pour pression basse/purge source d'oxygène	
3	CO2	Port interface CO2	Jaune
4	SPO2	Port d'interface SpO2	Bleu
5		Marche/arrêt à distance, pause sonore et port d'interface de sangle d'effort	Noir
6		Alarme à distance et port d'interface d'appel d'infirmière	Rouge
7		Port de connexion au réseau	
8		Port de connexion de données USB	
9		Alimentation secteur/entrée DC externe	Argent

VIVO 45

by Breas

BREAS

Guide simplifié



Pour plus d'informations, visitez : www.l3medical.fr



SCAN ME



L3 Médical


Le Parc des Alpes – 69 bis, rue de Malacombe
38070 Saint Quentin Fallavier – France

Tél.: +33 (0)474 825 727

Fax.: +33 (0)474 827 938


contact@l3medical.com www.l3medical.fr

Guide simplifié d'utilisation


 Ceci n'est pas un guide complet du Vivo 45. Pour des instructions complètes, consultez le manuel.

Marche / Arrêt

1 Si vous avez accès à l'alimentation secteur, assurez-vous que l'alimentation est correctement connectée.

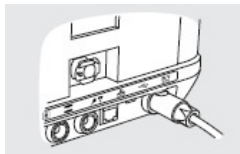


2 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du Vivo 45. La mise sous tension du Vivo 45 prend environ 30 secondes.

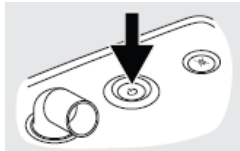

3 Sélectionnez oui/non lorsqu'il vous est demandé d'« effectuer un test avant utilisation ». (Le Vivo 45 peut être configuré au démarrage pour ne pas demander de test avant utilisation. Voir « La section Autres » à la page 56.)

Commencer le traitement

1 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du Vivo 45 et maintenez-le enfoncé.

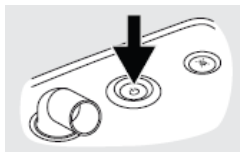


2 Relâchez le bouton Marche/Arrêt quand la barre de progression est remplie.



Remarque : Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton de démarrage, puis appuyer sur le bouton « Oui » lorsqu'on vous demande de commencer le traitement

Arrêter le traitement


1 Pour arrêter le traitement et entrer dans le mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt sur le panneau avant.

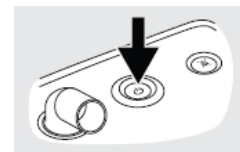

2 Relâchez le bouton Marche/Arrêt quand la barre de progression est remplie.




3 Appuyez sur « OK » ou sur le bouton pause sonore pour arrêter le traitement. Pour annuler le processus d'arrêt et poursuivre le traitement, appuyez sur « Annuler ».

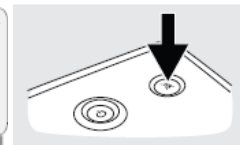

Navigation avec les boutons


Utilisez les cinq boutons de navigation et les boutons haut et bas du panneau afin de vous déplacer dans le menu du Vivo 45. Les boutons de navigation permettent de voir les différentes sections définies au-dessus de chacun de ces boutons. Ces mêmes boutons de navigation peuvent aussi être utilisés pour visualiser les informations supplémentaires de certaines sections ou être attribués à une fonction temporaire quand une fenêtre contextuelle est active.

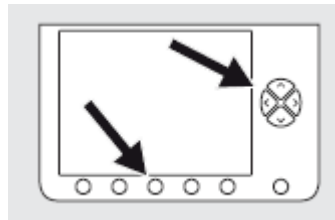

Utilisez les boutons haut et bas pour vous déplacer dans la liste des menus ou sélectionner différents paramètres.

Utilisez les touches fléchées (gauche et droite) pour modifier les paramètres, ou entrez et quittez les sous-menus.

Installation chambre d'humidification

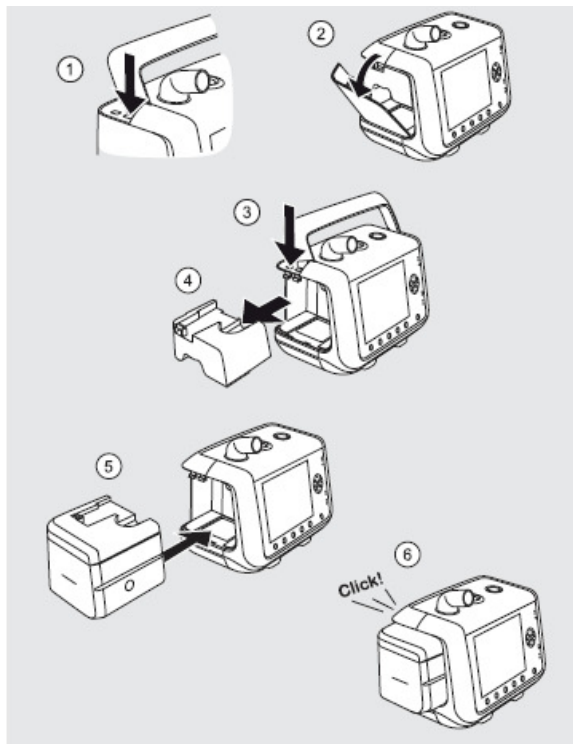


Paramètres et modes

MODES	VS	VS (Vtcib)	VPC	VPC (Vtcib)	VPC (A)	VPC (A+Vtcib)	CPAP
Fonctions :							
Pression insp.	✓		✓		✓		
PEP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fréq. resp.			✓	✓	✓	✓	
Temps insp.			✓	✓	✓	✓	
Tps insp. séc.	✓	✓					
Rampe	✓		✓		✓		✓
Tps montée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Décl. insp.	✓	✓			✓	✓	
Décl. exp.	✓	✓					
Tps insp. min.	✓	✓					
Temps insp. max.	✓	✓					
Fréq. de sécurité	✓	✓					
Volume cible			✓			✓	
Pression max.			✓			✓	
Pression min.			✓			✓	
CPAP							✓


Batteries

Connexion batterie click-in (option)


1 Relâchez le couvercle latéral en appuyant sur le bouton sous la poignée.

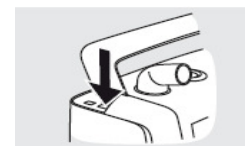


2 Ouvrez et retirez le panneau latéral.

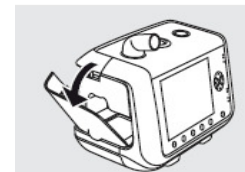

3 Insérez la batterie click-in. Assurez-vous que le loquet au bas du compartiment click-in est enclenché.

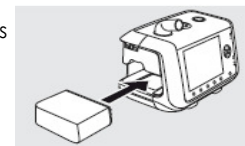

4 Fermez le panneau latéral. Assurez-vous qu'il y a un dé clic pour sécuriser le panneau latéral.

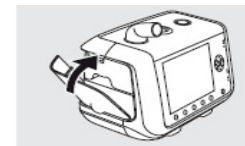

Temps de charge par chargeur Vivo 45

Batterie interne 2 heures
Batterie click-in (option) 4 heures

Autonomie

Batterie interne 2.5 heures
Batterie click-in 6.5 heures